

## ORTOZA ZA RAMO - AC

UPORABA: A.C. sindezmoliza


Namestitev lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na zdravnika.

### ORTOZA JE SESTAVLJENA IZ TREH DELOV:

1. (A) del za podlakt in nadlakt (slika 1)
2. (B) pas s plastičnimi sponkami, ki poteka čez ramo (slika 4)
3. (C) pas s plastičnimi sponkami, ki poteka čez prsni koš (slika 7)

### NAVODILO ZA NAMESTITEV:

1. V ožji del ortoze (A) vstavi roko, z trakovi - ježki (D) fiksiraj podlakt, nato nadlakt - SLIKE 1,2,3
2. Položimo drugi del ortoze na ramo (B) in nanj pripnemo trakove s plastičnimi zaponkami (E), ki visijo s komolca prvega dela ortoze (A), najprej na prednji strani točka 1, nato še pripnemo in zategnemo pas - točka 2, na hrbtni strani rame - SLIKE 4,5,6
3. Tretji del ortoze (C) povežemo s plastičnimi zaponkami z delom ortoze (B) v točki 1, ostali del ortoze (C) namestimo preko prsnega koša in pod pazduhe in ga na hrbtni strani povežemo s prosto sponko - točka 2, na drugi del ortoze (B) - SLIKI 7 in 8
4. Trak iz zapestja (F) prvega dela ortoze (A) povežemo s prosto sponko na tretji del ortoze (C) v točki 3 - SLIKA - 9
5. Z zategovanjem trakov D, E in F dosežemo funkcionalno in optimalno rabo ortoze (podlakt in nadlakt morata biti fiksirana pod pravim kotom) - SLIKA 9

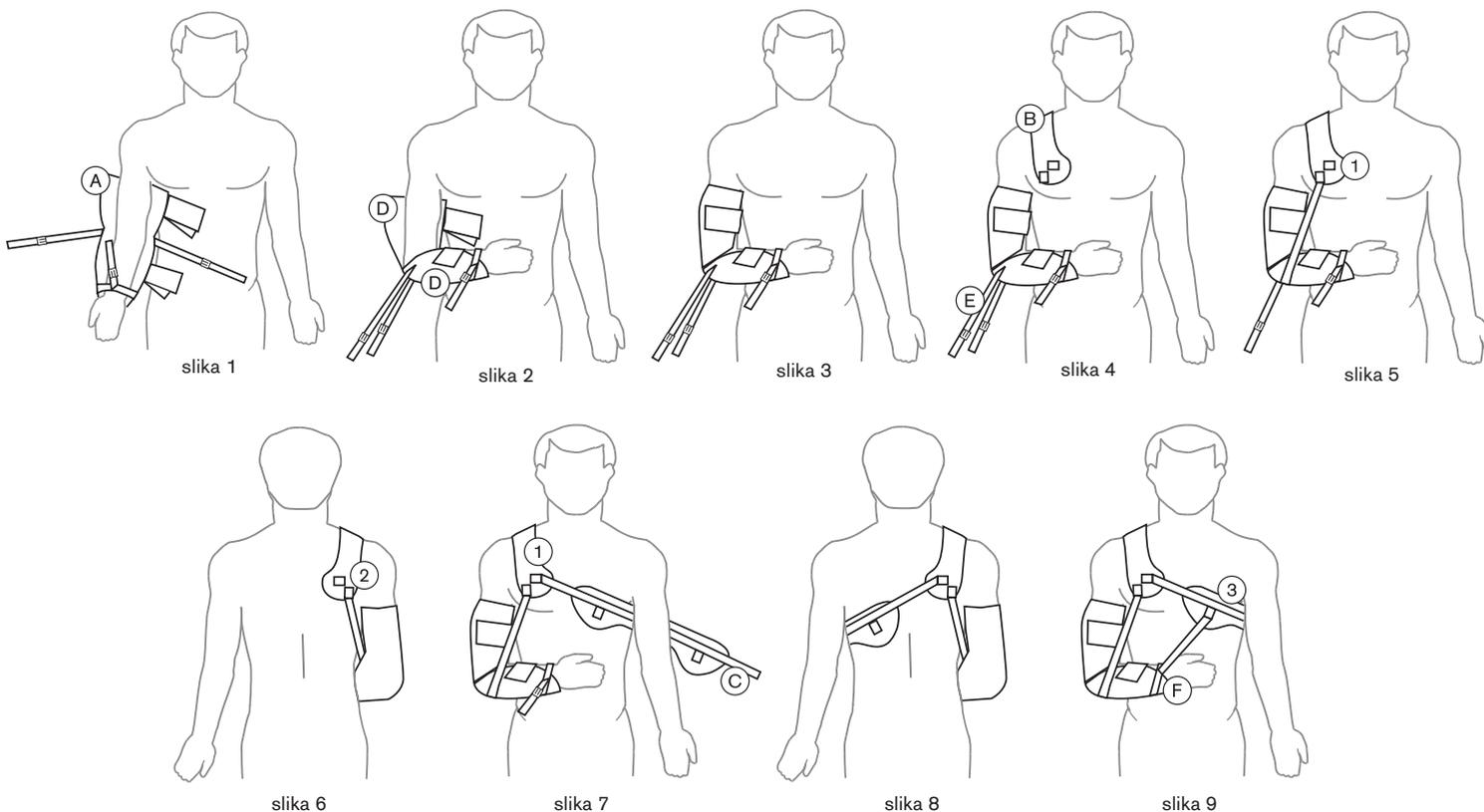

### NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE:

- Ortozo operite ročno v mlačni vodi in blagi milnici.
- Sušite na zraku pri sobni temperaturi.

VELIKOSTI	EAN
UN	3830021532016
PO MERI	3830021532009