

ORTOZA ZA RAMO - GC



UPORABA:

- stanja po operaciji ramenskega sklepa
- luksacija ramenskega sklepa
- stabilni zlomi

NAVODILO ZA NAMESTITEV:

Namestitev lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na zdravnika

1. Podlakt in nadlakt položimo v penasti del ortoze (A) in fiksiramo z ježki (B) - SLIKA 1
2. Trak (C) iz ramenskega dela speljemo okoli vratu, preko prsnega koša, pod podlaktjo (zapestjem) in okoli nje ter z ježkom spnemo na prsnem košu - SLIKA 2
3. Trak (D), ki poteka s spodnje strani zapestja speljemo okoli hrbta, pod nadlaktjo in okoli nje ter na hrbtne strani spnemo z ježkom (slika 76 do 79) - SLIKE 3, 4, 5, 6, 7
4. Z zategovanjem trakov C in D dosežemo funkcionalno in optimalno rabo ortoze.

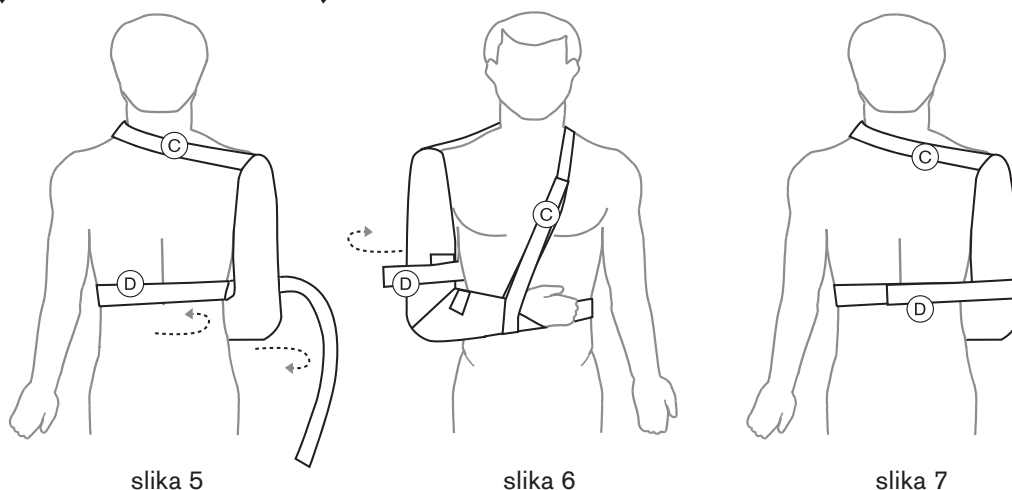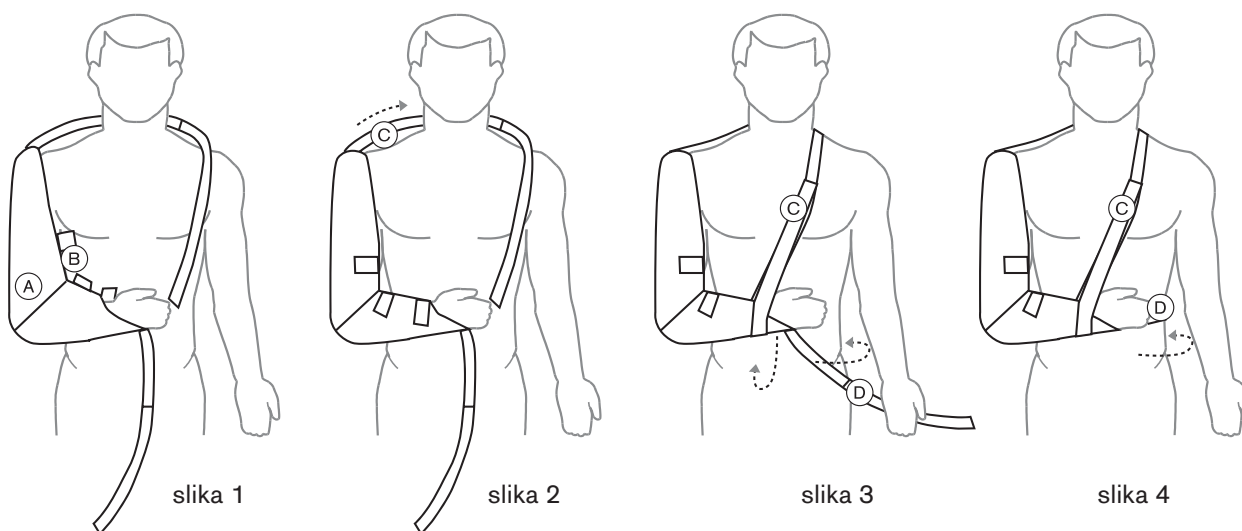

NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE:

- Ortozo operite ročno v mlačni vodi in blagi milnici.
- Sušite na zraku pri sobni temperaturi.

VELIKOSTI	EAN
XS	3830021533013
S	3830021533020
M	3830021533037
L	3830021533044
XL	3830021533051
XXL	3830021533068
PO MERI	3830021533006



ORTOZA ZA RAME - TORAKALNI OPRTNIK


UPORABA:

- zlom ključnice
- luksacija sternoclavicularnega sklepa


NAVODILO ZA NAMESTITEV:

Namestitev lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na zdravnika.


1. Ortozo prepognemo, tako da dobimo kraka enake velikosti in jo na sredini (A) naslonimo na vrat - SLIKA 2
2. Potegnemo oba kraka pod pazduho (B) - SLIKA 1
3. Skozi plastično zaponko (C) pritrdimo z ježkom trak (D) - SLIKA 2
4. Skozi plastični zaponki (E) pritrdimo navzkrižno trakova (F) - SLIKA 3
5. Z zategovanjem trakov D in F dosežemo funkcionalno rabo ortoze.

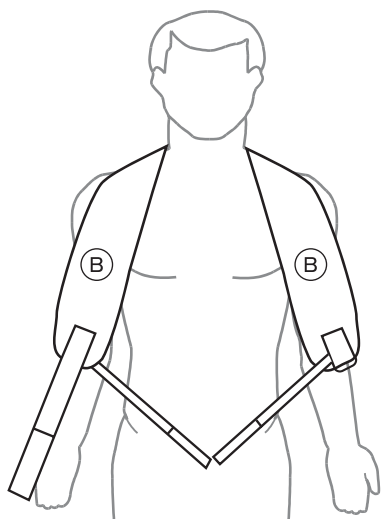

slika 1

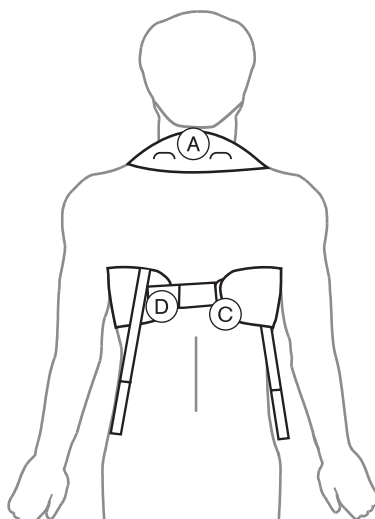

slika 2

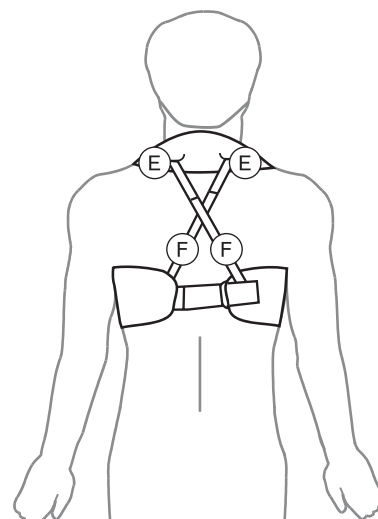

slika 3

NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE:

- Ortozo operite ročno v mlačni vodi in blagi milnici.
- Sušite na zraku pri sobni temperaturi.

VELIKOSTI	EAN
XS	3830021534010
S	3830021534027
S+	3830021534034
M	3830021534041
M+	3830021534058
L	3830021534065
XL	3830021534072
XXL	3830021534089
PO MERI	3830021534003



ORTOZA ZA RAMO - AC

UPORABA: A.C. sindezmoliza


Namestitev lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na zdravnika.

ORTOZA JE SESTAVLJENA IZ TREH DELOV:

1. (A) del za podlakt in nadlakt (slika 1)
2. (B) pas s plastičnimi sponkami, ki poteka čez ramo (slika 4)
3. (C) pas s plastičnimi sponkami, ki poteka čez prsni koš (slika 7)

NAVODILO ZA NAMESTITEV:

1. V ožji del ortoze (A) vstavi roko, z trakovi - ježki (D) fiksiraj podlakt, nato nadlakt - SLIKE 1,2,3
2. Položimo drugi del ortoze na ramo (B) in nanj pripnemo trakove s plastičnimi zaponkami (E), ki visijo s komolca prvega dela ortoze (A), najprej na prednji strani točka 1, nato še pripnemo in zategnemo pas - točka 2, na hrbtni strani rame - SLIKE 4,5,6
3. Tretji del ortoze (C) povežemo s plastičnimi zaponkami z delom ortoze (B) v točki 1, ostali del ortoze (C) namestimo preko prsnega koša in pod pazduhe in ga na hrbtni strani povežemo s prosto sponko - točka 2, na drugi del ortoze (B) - SLIKI 7 in 8
4. Trak iz zapestja (F) prvega dela ortoze (A) povežemo s prosto sponko na tretji del ortoze (C) v točki 3 - SLIKA - 9
5. Z zategovanjem trakov D, E in F dosežemo funkcionalno in optimalno rabo ortoze (podlakt in nadlakt morata biti fiksirana pod pravim kotom) - SLIKA 9

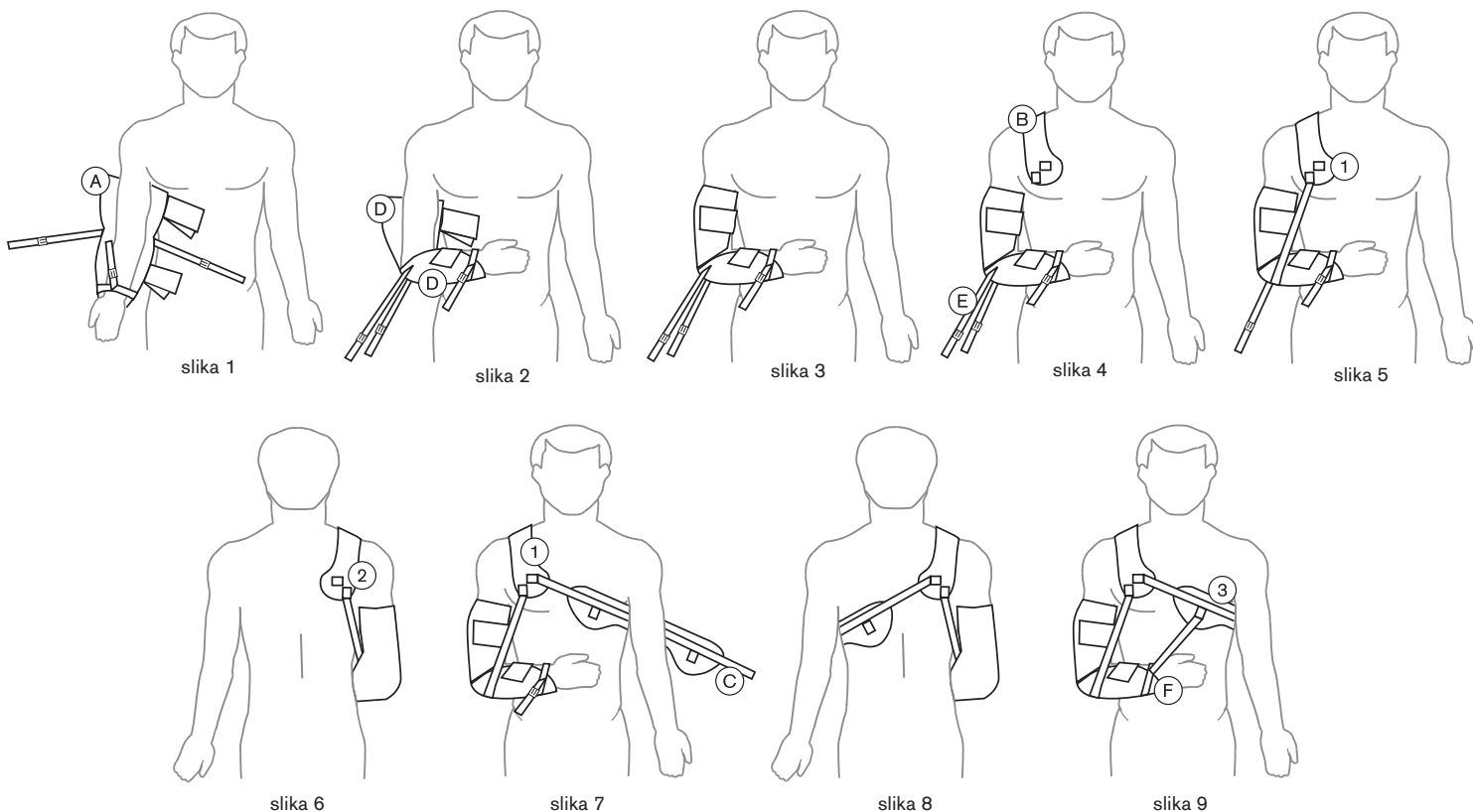

NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE:

- Ortozo operite ročno v mlačni vodi in blagi milnici.
- Sušite na zraku pri sobni temperaturi.

VELIKOSTI	EAN
UN	3830021532016
PO MERI	3830021532009

ORTOZA ZA RAMO - DO


UPORABA:

- stanja po operaciji ramenskega sklepa
- luksacija ramenskega sklepa
- stabilni zlomi

NAVODILO ZA NAMESTITEV

Namestitev lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na zdravnika.

1. Okoli pasu potegnemo trak (A) skozi plastično zaponko uho in na hrbtnem delu priprnemo z ježkom, če je trak predolg ga odrežemo - SLIKA 1
2. Z manšetami - ježki (B) fiksiramo nadlakt, nato podlakt - SLIKA 2
3. Trak (C) speljemo preko hrbta okoli vratu - SLIKA 2
4. Trak (D) spnemo skupaj z trakom (C) v točki 1, če je trak predolg, ga odrežemo - SLIKA 3
5. Z zategovanjem trakov C in D dosežemo funkcionalno rabo ortoze.

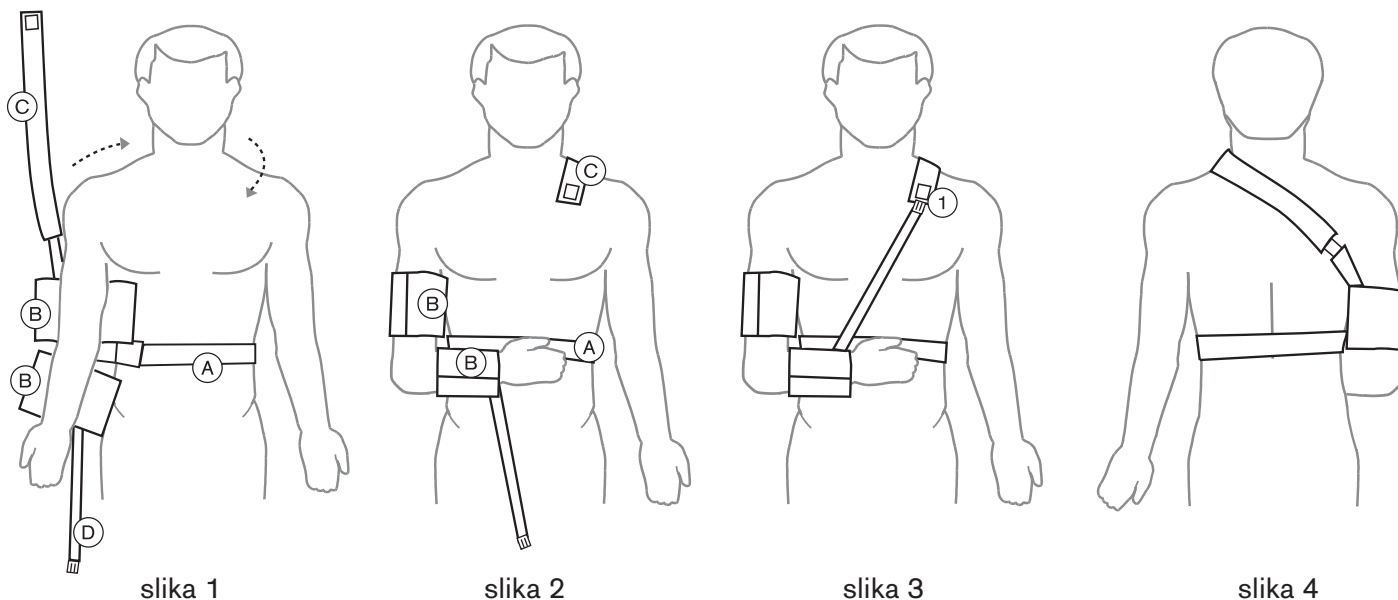

NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE:

- Ortozo operite ročno v mlačni vodi in blagi milnici.
- Sušite na zraku pri sobni temperaturi.

VELIKOSTI	EAN
R	3830021535026
L	3830021535013



ORTOZA ZA VRAT - MO


UPORABA:

- lažje poškodbe vratne hrbtenice
- izvini
- nategi


Namestitev lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na zdravnika.

NAVODILO ZA NAMESTITEV

Ortozo namestite na vrat in zadaj spnite z trakom-ježkom. - SLIKI 1 in 2

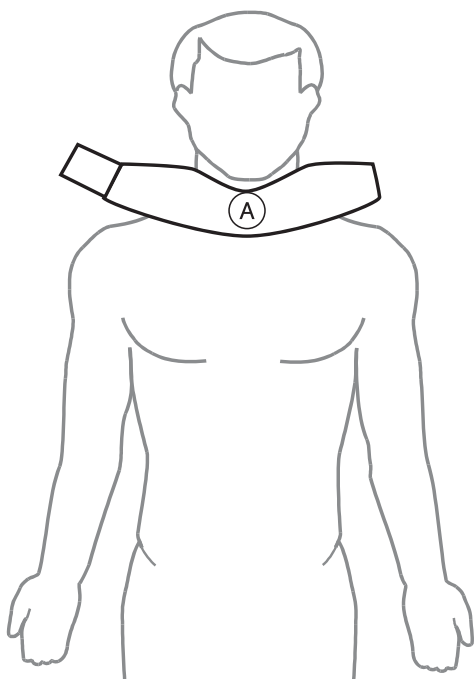

slika 1

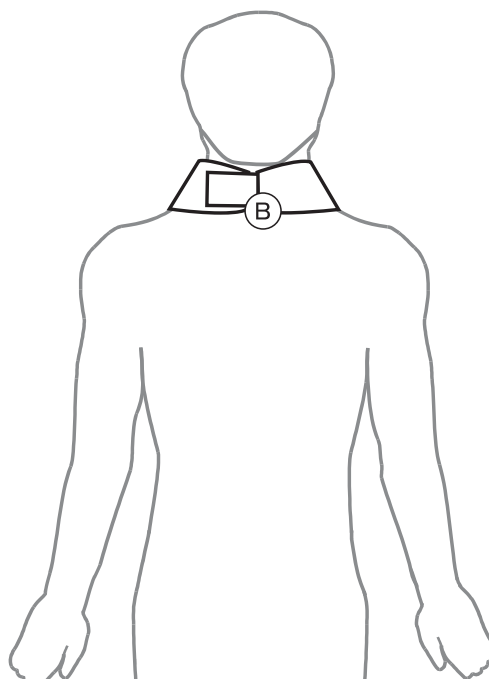

slika 2

NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE:

- Ortozo operite ročno v mlačni vodi in blagi milnici.
- Sušite na zraku pri sobni temperaturi.

VELIKOSTI	EAN
S - 8	3830021531019
S - 10	3830021531026
S - 12	3830021531033
M - 8	3830021531040
M - 10	3830021531057
M - 12	3830021531064
L - 8	3830021531071
L - 10	3830021531088
L - 12	3830021531095
PO MERI	3830021531002

